

装着説明書（2輪）

① 後足を後足用ベルト（H型）に通す



- ・アームの片方の化粧ビズを緩めアームを開いておきます。
- ・前方の胴回りベルト上のバックルを外しておきます。
- ・わんちゃんを抱きかかえ、後足を後足用ベルト（H型）に通します。

② 前足を下ろします。



- ・わんちゃんの前足を胴支えベルト下の前に前足を降ろします。
- ・胸当てベルトのバックルを閉じ、しっかり胸にあたるように長さを調整します。

③ 胴回りベルト上のバックルと胸当てベルトのバックルを閉じます。



- ・胸当てベルトのバックルを閉じ、しっかり胸にあたるように長さを調整します。

④ アームを閉じます。



- ・アームを閉じ化粧ビズを締めます。

⑤ バランスの調整

1. 高さの調整（縦フレーム・ベルト）

- ・ フレームが地面と平行、もしくは前に 5° ほど傾くように調整します。
胴回りベルト上を絞ることにより、フレーム前方が下がるのを防ぎます。
- ・ お散歩時は後方のU字フレームについている足乗せベルトに乗せて固定します。
足乗せベルトに乗せて固定します。
- ①のノブボルト（左右）を緩め伸ばすことにより、高さを高くできます。
また、ベルトを緩めたり、絞ったりすることでも高さを調整できます。



2. 長さの調整（横フレーム）

- ・ 前足の肩がフレームから出るか出ないか程度の長さに調整します。
- ・ 胸当てベルトが下がらないように、わんちゃんの胸に当て絞ります。
- ②の化粧ビス（左右）を緩めフレームを前方に引き出すことにより、長くできます。