



## 装着説明書（4輪）

### ① 後足を後足用ベルト（H型）に通す

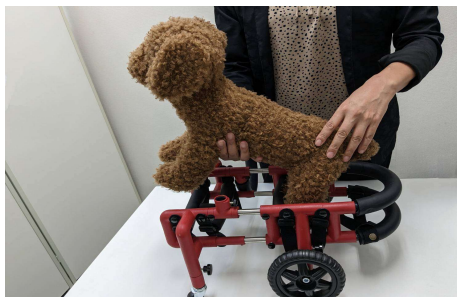


- ・アームの片方の化粧ビスを緩めアームを開いておきます。
- ・わんちゃんを抱きかかえ、後足を後足用ベルト（H型）に通します。

### ② 前足を前足用ベルト（H型）に通す

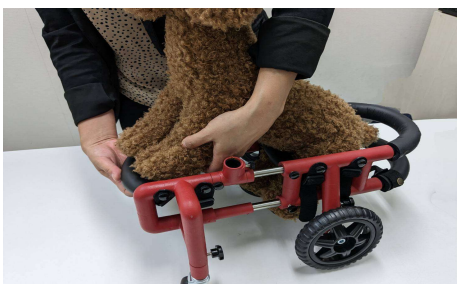

- ・わんちゃんの前足を前足用ベルト（H型）に通します。

### ③ アームを閉じます。

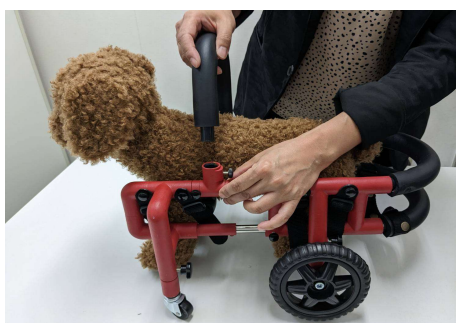

- ・アームを閉じ化粧ビスを締めます。

### ④ バランスの調整

#### 1. 高さの調整（縦フレーム・ベルト）

- ・わんちゃんの前足が地面に着き、蹴れるように調整します。
- ・後足が動くわんちゃんは、後足も地面に着くように調整します。
- ・後足が動かないわんちゃんは、お散歩時は後方のU字フレームについている足乗せベルトに乗せて固定します。

①②のノブボルト（左右）を緩め伸ばすことにより、高さを高くできます。  
また、ベルトを緩めたり、絞ったりすることでも高さを調整できます。

#### 2. 長さの調整（横フレーム）

- ・前足と後足を入れているベルトが真下に下がるように長さを調整します。
- ③④の化粧ビス（左右）を緩めフレームを前方に引き出すことにより、長くできます。

